



NeuraMetrix TC - Installationsanvisningar Uppdaterad 12 December 2019

[Vilka är kraven för att installera NeuraMetrix TC?](#)

[Hur skapar jag ett extra Windows-användare konto?](#)

[Var kan jag lära mig mer om användarkonton?](#)

[Hur installerar jag NeuraMetrix TC-applikationen?](#)

[Hur kontrollerar jag att installationen är installerad och igång?](#)

[Hur får jag tillgång till funktionerna i programmet?](#)

[Jag kan inte ladda ner eller installera NeuraMetrix TC](#)

[Kan två \(eller\) fler användare av en dator vardera övervakas med hjälp av NeuraMetrix TC?](#)

[Hur avinstallerar jag NeuraMetrix TC?](#)

[Var kan jag kontakta support för NeuraMetrix TC?](#)

Klicka  för att återvända till den övre delen av den här sidan

Vilka är kraven för att installera NeuraMetrix TC?

Det första kravet är att du använder en Windows-dator med ett traditionellt tangentbord med riktiga tangenter. Det kan vara en stationär dator, en bärbar dator eller en lätt bärbar dator / surfplatta (som en Windows Surface Pro).

Det andra kravet är att du är den enda användaren av din dator eller du har ditt eget Windows användarkonto (skärmen som kommer upp tidigt när du startar datorn och ber dig om användarnamn och lösenord) som inte delas med någon annan.

Hur skapar jag ett extra Windows-användare konto?

Du måste skapa ditt eget användarkonto om du för närvarande delar ditt användarkonto med någon annan och inte redan har separata konton.

Med separata användarkonton kan flera personer enkelt dela samma dator. Varje person kan ha ett separat användarkonto med unika inställningar och preferenser, till exempel en stationär dator bakgrund eller skärmläckare. Det är av säkerhetsskäl bra praxis att ha ditt eget konto. Användarkonton kontrollerar vilka filer och program som användaren kan komma åt och vilka typer av förändringar användaren kan göra på datorn. Vanligtvis vill du skapa standardkonton för de flesta datoranvändare.

Var kan jag lära mig mer om användarkonton?


Det finns flera ställen där du kan lära dig om Windows användarkonton. Förutom Microsoft-resurser erbjuder [GCFLearnFree.org](http://www.gcflearnfree.org) programmet gratis lektioner för många teknikämnen, inklusive "Understanding User Accounts" som finns här på engelska:
<http://www.gcflearnfree.org/windowsbasics/understanding-user-accounts/1/>

Hur installerar jag NeuraMetrix TC-applikationen? ↗


1. Hitta installationsfilen.
 - A. **Om din vårdgivare eller institution levererade NeuraMetrix TC:**
 - i. Din vårdgivare eller institution mailade dig nedladdningsinstruktioner med ditt tilldelade användar-ID och lösenord plus en länk för att ladda ner NeuraMetrix TC-installationsfilen. Öppna detta mejl och klicka på [länken](#) i mejlet för att ladda ner filen (**neuramatrix-clinic-setup-recent.exe**) till mappen **Nedladdningar**. Spara detta mejl då du behöver ditt användar-ID och lösenord om du behöver om-installera programmet.
 - B. **Om du köpt NeuraMetrix TC från NeuraMetrix websida:**
 - i. När du registrerade dig hade du möjligheten, under registreringsprocessen, att ladda ner NeuraMetrix TC installationsfilen för ditt användar-ID. Filen (**neuramatrix_client_web_installer.exe**) kommer att finnas i mappen **Nedladdningar** där dina nedladdade filer automatiskt lagras.
 - ii. Efter registreringen ska du även fått ett mejl med en länk för att ladda ner NeuraMetrix TC installationsfilen för ditt användar-ID. Öppna mejlet och klicka på [länken](#) i mejlet för att ladda ner filen (**neuramatrix_client_web_installer.exe**) i mappen **Nedladdningar**.
 - iii. Slutligen, om du inte laddade ner filen och/eller inte längre har mejlet med nedladdningslänken kan du hämta installationsprogrammet på: <http://downloads.neuramatrix.com/neuramatrix-setup-latest.exe> (eller kopiera det till din webbläsare) för att ladda ner installationsfilen. Du måste ange ditt användar-ID och lösenord för att slutföra installationen om du använder den här metoden för att hämta installationsprogrammet.
2. Hur du hämtar/öppnar en fil beror på vilken webbläsare du använder för att accessa Internet:
 - A. **Chrome**
 - i. **neuramatrix_client_web_installer.exe** filen kommer att laddas ner och visas i det nedre vänstra hörnet
 - ii. **Dubbel-klicka på filen**
 - iii. Gå till 3 (nedan)
 - B. **Firefox**
 - i. När du får frågan "*Vill du spara den här filen?*" Klicka på **Spara filen**
 - ii. Klicka på **Nedladdningar** (en nedåtpil i övre högra hörnet) eller gå till mappen **Nedladdningar**
 - iii. Ett fönster visar en katalog med filen **neuramatrix_client_web_installer.exe** (översta filen) **Dubbelklicka på filen** .
 - iv. Gå till 3 (nedan)
 - C. **Microsoft Edge**
 - i. När du får frågan "*Vad vill du göra med neuramatrix_client_web_installer.exe?*" Klicka på **Kör** (en säkerhetsscanning kommer att köras)
 - ii. Gå till 3 (nedan)
 - D. **Internet Explorer**
 - i. När du får frågan "*Vill du köra eller spara neuramatrix_client_web_installer.exe från s3.amazonaws.com?*" Klicka på **Kör** (en säkerhetsscanning kommer att köras)
 - ii. Gå till 3 (nedan)
 - E. **Opera**

NeuraMetrix TC - Installationsanvisningar (Sid 3 av 9)


- i. En dialogruta kommer dyka upp och visar var filen ska sparas. Klicka på **Spara**
 - ii. Klicka på **Nedladdningar** (en nedåtpil i övre högra hörnet) eller gå till mappen Nedladdningar
 - iii. Ett fönster visar en katalog med filen neurametrix_client_web_installer.exe (översta filen) **Dubbelklicka på filen.**
 - iv. Gå till 3 (nedan)
3. När du får frågan "*Vill du tillåta följande program att göra ändringar på den här datorn?*" Klicka på **Ja**

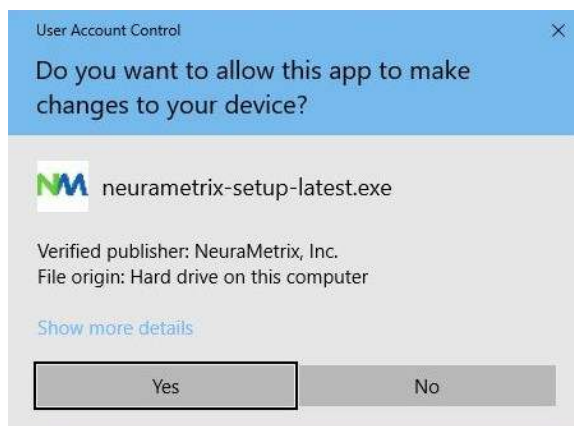

4. När du får frågan "*Läs licensvillkoren innan du installerar NeuraMetrix.*" Läs avtalet och klicka på **Jag samtycker**

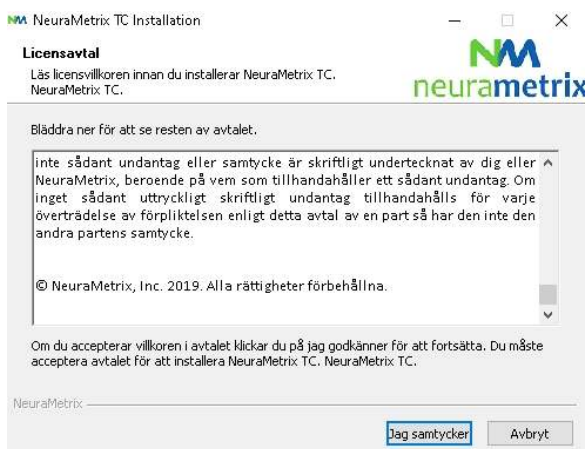


5. När du får frågan "Vänligen ange ditt användar-ID (om inte automatiskt ifyllt) och lösenord", ange **Användar-ID** (om inte automatiskt ifyllt) och lösenord som du skapade när du registrerade och klicka på **Nästa**

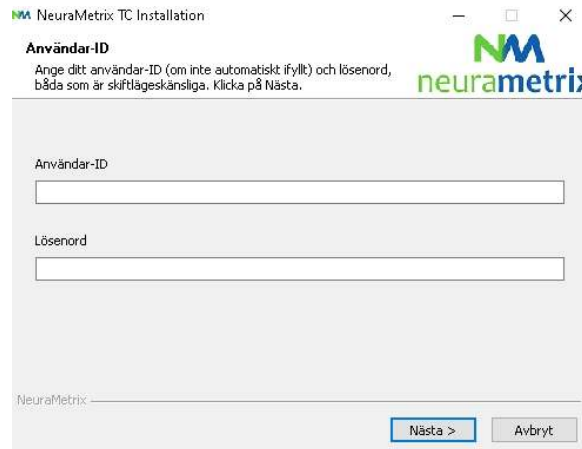


The screenshot shows a window titled "NeuraMetrix TC Installation". The main heading is "Användar-ID". Below it, there is a sub-heading "Användar-ID" and a note: "Ange ditt användar-ID (om inte automatiskt ifyllt) och lösenord, båda som är skiftlägeskänsliga. Klicka på Nästa." There are two text input fields: the first is labeled "Användar-ID" and the second is labeled "Lösenord". At the bottom right, there are two buttons: "Nästa >" and "Avbryt". The NeuraMetrix logo is visible in the top right corner of the window.

6. När du får frågan "Välj vilken mapp för att installera NeuraMetrix", välj den förvalda mappen (eller välj en annan mapp) och klicka på **Installera**

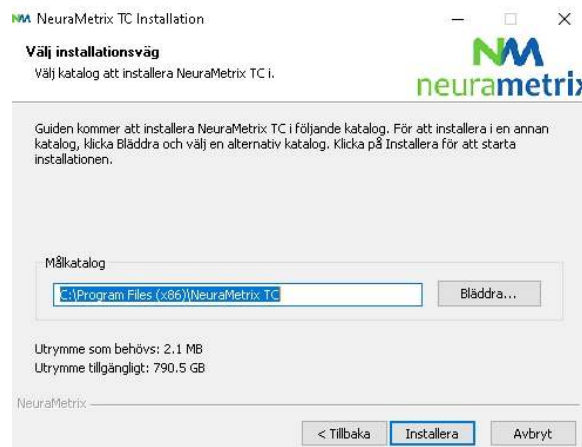

The screenshot shows a window titled "NeuraMetrix TC Installation". The main heading is "Välj installationsväg". Below it, there is a sub-heading "Välj installationsväg" and a note: "Välj katalog att installera NeuraMetrix TC i." There is a text input field labeled "Målkatalog" containing the path "C:\Program Files (x86)\NeuraMetrix TC" and a "Bläddra..." button. Below the input field, there is a note: "Utrymme som behövs: 2.1 MB" and "Utrymme tillgängligt: 790.5 GB". At the bottom right, there are three buttons: "< Tillbaka", "Installera", and "Avbryt". The NeuraMetrix logo is visible in the top right corner of the window.

7. NeuraMetrix har installerats på din dator.

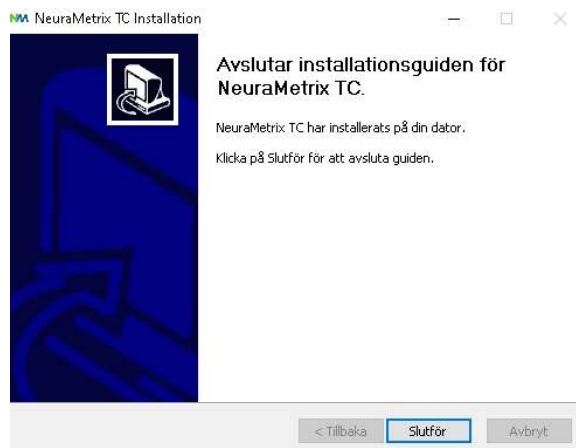

Hur kontrollerar jag att installationen är installerad och igång?

Efter installationen finns NeuraMetrix TC i bakgrunden och det behöver inte slå på (eller av) programmet. Du kommer att se en "NM"-ikon i Aktivitetsfältet (nedre högra hörnet) på din datorskärm. Du kan "högerklicka" på ikonen för att se ett urval av åtgärder.

Du kan också kontrollera att installationen är installerad och körs genom att öppna din Aktivitetshanterare:


1. Klicka på **Ctrl+Alt+ Delete**
2. Klicka på **Aktivitetshanterare**
3. För att hitta **NeuraMetrix TC-klienten (32-bit)**-programmet, se under fliken Processer i vänstra applikationskolumnen för bakgrundsprocesser.

Hur får jag tillgång till funktionerna i programmet?


När du har installerat NeuraMetrix TC visas en ikon med vår logotyp "NM" i systemfältet. Systemfältet ligger längst ned till höger på skärmen. Om du lägger pekaren på NM ikonen och högerklickar med musen kommer en meny att visas med en uppsättning alternativ:

Meny	Kommentarer
Dashboard	Direkt länk till din dashboard, en visuell och lättfattlig display, på NeuraMetrix skyddade web portal, om din vårdgivare ger sitt tillstånd.
Uppdatera profil	Här kan du uppdatera din profil. Endast tillgänglig om du köpt direct från NeuraMetrix websida.
Ändra lösenord	Här kan du byta ditt lösenord.
Vanliga frågor (FAQs)	Här finner du svar på vanliga frågor (FAQs).
Meddelande	Här kan du kontakta NeuraMetrix support utan att släppa någon personlig identifierbar information.
NeuraMetrix.com	Direkt länk till NeuraMetrix websida.
Mer	


- Om	Här kan du se vilken NeuraMetrix version som du har installerad och vilka myndighetsgodkännanden NeuraMetrix TC har.
- Sök efter uppdatering	Om du klickar på Mer ... kommer du att kunna Sök efter uppdatering . Om en uppdatering är tillgänglig, klicka på OK och den senaste versionen av NeuraMetrix TC kommer att installeras.

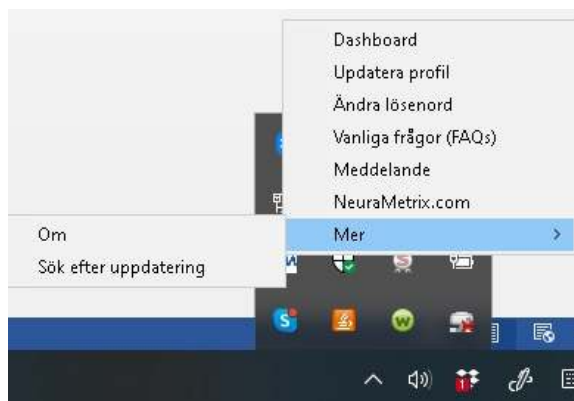

Om du klickar på **Mer ...** kommer du att kunna **Sök efter uppdatering**. Om en uppdatering är tillgänglig klickar du på **OK** och den senaste versionen av NeuraMetrix TC kommer att installeras.

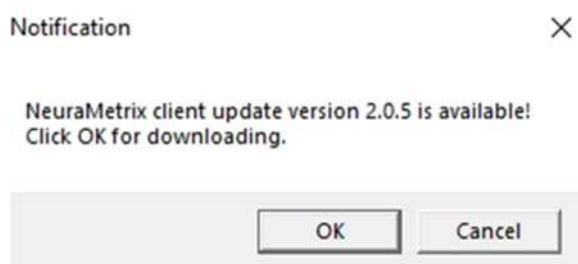

Du kan också använda Windows Start-menyn för att komma åt en länk till din Dashboard. Klicka på Windows-knappen i det nedre vänster hörnet på skärmen och bläddra ner till NeuraMetrix TC för att komma åt en ikon för din Dashboard. Du kan "fästa" Dashboard-ikonen till Windows Start-menyn för enkel åtkomst.

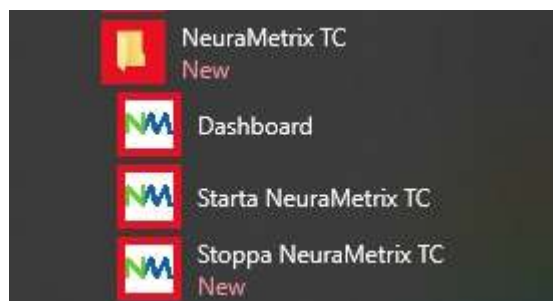

Jag kan inte ladda ner eller installera NeuraMetrix TC

Om du inte kan ladda ner eller installera NeuraMetrix TC, eller det är svårt att ansluta till nedladdning och installation av uppdateringar, kan det vara ditt antivirusprogram eller din brandvägg som blockerar NeuraMetrix TC från att utföra dessa funktioner. Det kan vara nödvändigt att du tillfälligt avaktiverar din brandvägg eller antivirusprogram för att avgöra om det är någon av dessa som orsakar anslutningsproblemen, och att ansluta för att hämta uppdateringen etc.


De flesta brandväggar och antivirusprogram som körs på din dator visas på ditt Windows Aktivitetsfält bredvid klockan. De flesta program kommer att tillåta dig att Högerklicka på ikonerna och välj ”**Stäng av**” eller ”**Avaktivera** . ” Om du inte ser det här alternativet måste du öppna brandväggen eller anti-virus programmet och avaktivera den. Om du behöver ytterligare, detaljerade instruktioner om hur du avaktiverar eller stänger av en specifik brandvägg eller antivirusprogram, kontakta programvaruföretaget direkt.

Om du tillfälligt avaktiverar din brandvägg eller ditt antivirusprogram gör det bara medan du installerar NeuraMetrix installationen. VAR NOGA MED ATT SLÅ PÅ DEN IGEN NÄR INSTALLATIONEN ÄR KLAR.

Kan två (eller) fler användare av en dator vardera övervakas med hjälp av NeuraMetrix TC?

Ja. Som sagt ovan, om varje person har sitt eget Windows användarkonto kan var och en registrera sig och använda NeuraMetrix TC. Om du delar din dator med någon annan som vill använda NeuraMetrix TC, kan du gå igenom samma process för att registrera, ladda ner och installera NeuraMetrix TC för ett annat användarkonto.


Om du försöker installera mer än en kopia av NeuraMetrix TC på ett enda användarkonto ser du detta meddelande. Se vanliga frågor (FAQ) om hur du skapar ett extra Windows användarkonto.

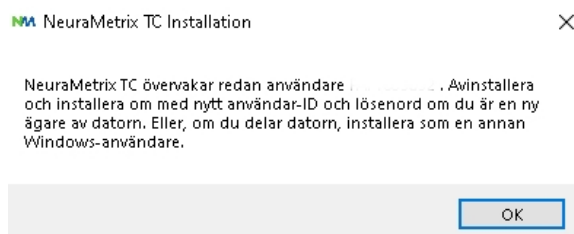


Hur avinstallerar jag NeuraMetrix TC?

Du kan bestämma dig för att sluta när som helst och du kan välja att ta bort NeuraMetrix TC när som helst:


1. Öppna Windows-startmenyn, bläddra ner och klicka på **Inställningar**
2. Klicka på **Applikationer**
3. Bläddra ner och klicka på **NeuraMetrix TC** ; klicka sedan på **Avinstallera**
4. När du får frågan "*Vill du tillåta den här appen att göra ändringar på din maskin?*" Klicka på **Ja**

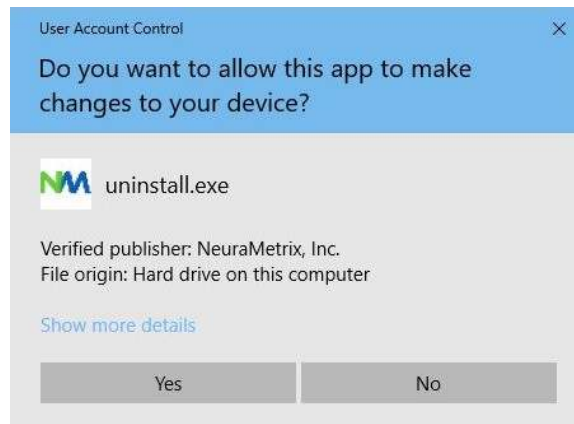

5. När skärmen med "Avinstallera NeuraMetrix TC " visas , Klicka på **Avinstallera**

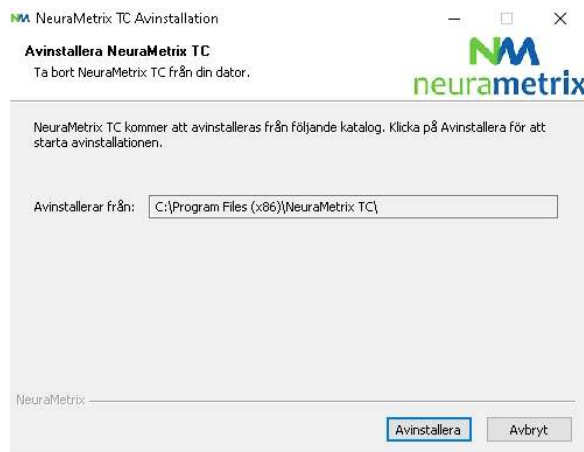

6. NeuraMetrix TC har avinstallerats från din dator. Klicka på **Stäng**

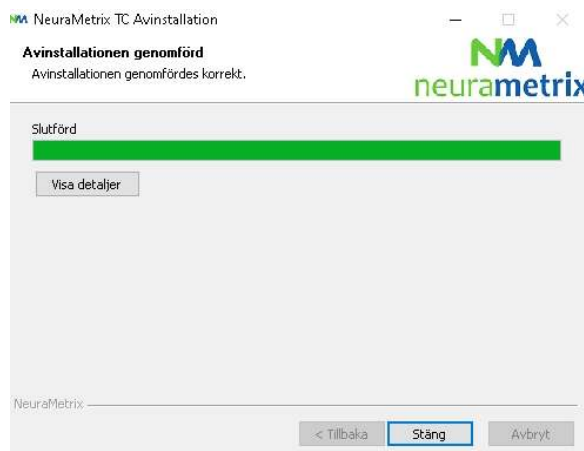

Var kan jag kontakta support för NeuraMetrix TC? ↗

Om du inte kan hitta svar på dina frågor i detta NeuraMetrix Installationsanvisningar-dokument kan du antingen kontakta din vårdgivare eller institution eller skicka ett meddelande till NeuraMetrix supportteamet (utan att släppa någon personlig identifierbar information) med hjälp av NeuraMetrix meddelandesystem, tillgängligt från systemfältet.